

Zeta 52+ Absauganlagenreiniger, Konzentrat

Highlights:

- ✓ Für starke Verunreinigungen
- ✓ Biologisch abbaubar

Art der Anwendung

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst.

Hinweise zur Anwendung:

Der Spezialreiniger wird bei Problemfällen als 10 %ige Lösung angewendet (100 ml / l Wasser). Die Einwirkzeit liegt bei 1-2 Stunden. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Reiniger als 5 %ige Lösung (50 ml / l Wasser) 1-2 Mal wöchentlich für 30 min einwirken gelassen.

2 Liter der Gebrauchslösung werden über die Saugschläuche durchgesaugt und nach der Einwirkzeit wird die Anlage mit einem Liter Wasser gespült. (Entspricht 2 x ½ Dosierkappe in 2 Liter Wasser).

Sicherheitshinweise:

H 319 Verursacht schwere Augenreizung. Nach Handhabung gründlich waschen.

Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VO 648/2004/EG:

< 5 % amphotere Tenside,

< 5 % Phosphonate

Artikelnummern:

C800317 Zeta 52+ Absauganlagenendesinfektion, neutral



Achtung!

