

**Zeta 55 Sani**  
**Mundspülbeckenreiniger****Wichtige Hinweise**

Die Mundspüldesinfektion ist ein alkalisches Spezialpräparat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten.

Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid
- ✓ Levurozid (Candida albicans)
- ✓ Tuberkulozid

Hinweise zur Anwendung:

Mundspülbeckendesinfektion Zeta 55 Sani entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten. Zeta 55 Sani wird unverdünnt angewendet. Zum Öffnen den Sicherheitsverschluss an den glatten Flächen zusammendrücken und drehen. Das Mundspülbecken mit ca. 20ml des Reinigers flächig befeuchten und kurz einwirken lassen, bzw. mit einem Schwamm oder einer Bürste verteilen. Nach mind. einer Minute Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Empfehlenswert ist die Anwendung nach jeder Verschmutzung.

Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum	Einwirkzeit
Bakterien und Candida albicans nach EN 13697, EN 13727, EN 13624 (niedrige Belastung):	Konz. 1 Minute
Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 (hohe Belastung):	Konz. 5 Minuten
TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung):	Konz. 5 Minuten

Sicherheitshinweise:

H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

In 100g enthalten:

25g Ethanol, 1.0g Bis(3-Aminopropyl)dodecylamin

Artikelnummer:

C800420 Zeta 55 Sani

**750 ml e**



MD



CE 0124

Gefahr



Hersteller: Prisman GmbH  
Otto-Hahn-Ring 6-18 | 64653 Lorsch  
Tel.: 06251-866980-0

Vertrieb durch: Zhermack GmbH Deutschland  
Öhlmühle 10 | 49448 Marl am Dümmer  
Tel.: 05443-2033-0 | info@zhermack.de

Rev. 06/2021