

Zeta 15 Ultraschallreiniger

Wichtige Hinweise

Zeta 15 ist ein neutrales Reinigungskonzentrat mit Korrosionsschutz für alle gängigen Ultraschallbäder.

Eigenschaften:

- ✓ Neutraler Ultraschallreiniger
- ✓ Nicht korrosiv
- ✓ Hohe Reinigungskraft

Hinweise zur Anwendung:

In einer empfohlenen Verdünnung von 1:20 – 1:40 werden Instrumente und andere Geräte oder Materialien von hartnäckigen Verschmutzungen, die insbesondere in der Dental-Praxis und im Dental-Labor auftreten, befreit. Zeta 15 hat eine hohe Reinigungskraft gegenüber Fetten, Wachsen, Ölen oder Polierpasten sowie andere Schleifrückstände von Kronen, Brücken, Prothesen oder Modellgussgerüsten.

Sicherheitshinweise:

H 318 Verursacht schwere Augenschäden.

H 315 Verursacht Hautreizungen.

Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält Sulfonsäure, C13-C17-sec-Alkan-, Natriumsalze.

VO 648/2004/EG:

15% bis 30% anionische Tenside,

< 5% nichtionische Tenside Duftstoffe.

Artikelnummern:

C800120 Zeta 15 Ultraschallreiniger, 2500 ml



Gefahr

