



SUPPORT	COLORS
REF: lab Alginat Adhäsiv Spray 300ml	
Cod. C333970	
Fust. 187x100 mm	
Cust. Zhermack GmbH	
Zhermack S.p.A.   via Bovazecchino, 100   45021 Badia Polesine (Rovigo) Italy   T +39 0425 597611   F +39 0425 53596   info@zhermack.com   www.zhermack.com	
	

**Zhermack**

# Alginat Adhäsiv Spray

300 ml e

**Art der Anwendung:**

Das Alginat Adhäsiv Spray erzeugt eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dient als Adhäsiv für Alginat im zahnärztlichen Bereich.


**Hinweise zur Anwendung:**

Dose sollte vor der Verwendung kurz geschüttelt werden. Der Film wird aus ca. 10-20 cm gleichmäßig aufgesprüht (ca. 3-5 s / Löffel). Nach einer kurzen Trocknungszeit (ca. 5 min) kann das Abformmaterial aufgebracht werden (Reinigung des Löffels mit Adhäsiv Löser Spray).

**Sicherheitshinweise:**

H 222 - H 229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Einatmen von Aerosol vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**3** 405

 siehe Aufdruck


**LOT** siehe Aufdruck

**REF** C333970



**Gefahr**

Rev. 2016-04

 Zhermack GmbH Deutschland | Ölmühle 10 | 49448 Marl am Dümmer | Germany  
T 05443/2033 - 0 | F 05443/2033 - 11 | www.zhermack.de

