

universal tray adhesive

adhesive for a-silicone
impression material

Last Update 2019-01

0113384-2019-01

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com



universal tray adhesive DE

KLEBSTOFF FÜR ABDRUCKMATERIAL AUF SILIKONBASIS

TRAY ADHESIVE wurde eigens erschaffen, um die Klebekraft des Additions- (ELITE HD+, ELITE P&P, COLORISE, HYDRORISE) bei Standard-Abdruckträgern aus Metall und bei individuellen Bißlöffeln aus Kunststoff zu sichern.

ANWENDUNG

- Die Oberflächen des Abdruckträgers müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
- Eine dünne Schicht Klebstoff auf die Oberflächen streichen, die mit dem Abdruckmaterial in Berührung kommen.
- Etwa 2 Minuten warten oder für eine schnellere Trocknung einen Luftstrahl benutzen; dann das Silikon auftragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit reichlich fließendem Wasser abspülen.
 - Die Dämpfe nicht einatmen
 - Das Fläschchen nach Gebrauch verschließen
 - Das Produkt nicht in der Nähe von Flammen oder Funken aufbewahren
 - Kittel oder andere Kleidungsstücke nicht mit Klebstoff beschmutzen, da er nur schlecht zu entfernen ist
 - Eventuelle Rückstände mit Alkohol beseitigen
-
- LAGERUNG: 5-27° C (41-80° F)
 - VERPACKUNG: Flasche à 10 ml

NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE ANWENDUNG