

## Zeta 32+ Soft Desinfektionstücher

### Desinfektionstücher zur schnellen Flächen-Wischdesinfektion

### Wichtige Hinweise

Gem. EU Medizinprodukte-Verordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennahe Umgebung.

Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid
- ✓ Tuberkulozid
- ✓ Mykobakterizid
- ✓ Begrenzt viruzid PLUS

Hinweise zur Anwendung:

Flächen mit Zeta 32+ Soft Desinfektionstücher bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient ist zu melden.

Wirkspektrum und Einwirkzeit:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion

Wirkungsspektrum	Einwirkzeit
Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	5 Minuten
Tuberkulozid (M. terrae) gem. EN 14348	30 Sekunden
Mykobakterizid (M. terrae und M. avivum) gem. 14348	1 Minute
Begrenzt viruzid EN 14476	1 Minute
Begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476	3 Minute
Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476	1 Minute
Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476	3 Minuten

Zusammensetzung:

100 g Tränkfüssigkeit enthalten:  
Ethanol 45 g

Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage  
Baua-Nr. N-83802

Artikelnummer:

C800720 Zeta 32+ Soft Desinfektionstücher



Inhalt:

70 Tücher, Tuchmaße 250 x 250 mm

