

Zeta 15

Ultraschallreiniger

Wichtige Hinweise

Zeta 15 ist ein neutraler Instrumentenreiniger mit Korrosionsschutz als Konzentrat für alle gängigen Ultraschallbäder.

Eigenschaften:

- ✓ Neutraler Ultraschallreiniger
- ✓ Nicht korrosiv
- ✓ Sehr hohe Reinigungskraft
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit

Hinweise zur Anwendung

In einer empfohlenen Verdünnung von 1:20 – 1:40 werden Instrumente und andere Geräte oder Materialien von hartnäckigen Verschmutzungen, die insbesondere in der Dental-Praxis und im Dental-Labor auftreten, befreit. Es besteht eine sehr hohe Reinigungskraft gegenüber Fetten, Wachsen, Ölen oder Polierpasten sowie andere Schleifrückstände von Kronen, Brücken, Prothesen oder Modellgussgerüsten.

Sicherheitshinweise:

H 318 – Verursacht schwere Augenschäden.

H 315 – Verursacht Hautreizungen.

Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen.

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.

Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen. Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Gezielte Behandlung (siehe Kennzeichnungsschild).

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

648/2004/EG:

Zwischen 15% und 30% anionische Tenside

< 5% nichtionische Tenside Duftstoffe.