

## Zeta 55 Nano Foam

### Mundspülbeckendesinfektion

### Wichtige Hinweise

Die Mundspülbeckendesinfektion ist ein Spezialschaum zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Zeta 55 Nano Foam entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten mit Hilfe eines Aktivreinigungssystems.

Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden.

Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid
- ✓ Levurozid (Candida albicans)
- ✓ Tuberkulozid

#### Hinweise zur Anwendung:

Vor der Anwendung Dose kurz schütteln und mit dem Sprühkopf nach unten applizieren. Das Mundspülbecken rundum einschäumen und kurz einwirken lassen. Nach mind. einer Minute Einwirkzeit entweder zusätzlich mechanisch reinigen oder mit Wasser abspülen.

#### Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum	Einwirkzeit
Bakterien und Candida albicans gemäß EN 13697 (niedrige Belastung):	Konz. 1 Minute
TbB-Inaktivierung (M.terrae, EN 14348, niedrige Belastung):	Konz. 5 Minuten

#### Sicherheitshinweise:

H 222 – H 229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze / heißen Oberflächen / Funken / offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

VO 648/2004/EG:

< 5 % nichtionische Tenside, <5 % EDTA

#### Artikelnummer:

C800430 Zeta 55 Nano Foam

