

Zeta 50+

Absauganlagendesinfektion, Konzentrat

Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid (inkl. MRSA)
- ✓ Levurozid (Candida albicans)
- ✓ Viruzid gegenüber allen behüllten Viren (z.B. HBV, HCV, HIV)

Art der Anwendung:

Zur Reinigung und Desinfektion von dentalen Absauganlagen (inkl. Speichelsauger), Amalgamabschneidern und Mundspülbecken.

Hinweise zur Anwendung:

Das Konzentrat muss zuerst mit Wasser verdünnt werden. Empfohlene Anwendungskonzentration: 2%. Dazu 20ml Konzentrat mit Leitungswasser auf 1.000 ml auffüllen und dieses durch den Saugschlauch (Speichelabsauger) durchsaugen. Die Sauganlage sollte je nach Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Diese Desinfektion des Mundspülbeckens erfolgt durch Eingießen von ca. 250ml der gebrauchsfertigen Verdünnung. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Gebrauchsfertige Lösungen immer frisch ansetzen und sofort verwenden.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH; levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH; begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI.

Einwirkzeiten

Einwirkzeiten	Konz.	Min.
Bakterien und Candida albicans nach VAH mit hoher Belastung als Instrumentendesinfektion:	2,0 % 1,0 %	5 Min. 60 Min.
Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung):	3,0 %	2 Min.
Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung):	3,0 %	2 Min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HCV, HIV) nach DVV/RKI (mit Belastung):	2,0 %	2 Min.

Sicherheitshinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Enthält N,N-Dimethyl-N-Dioctylammoniumchlorid, Kaliumhydroxid

VO 648/2004/EG:

Enthält < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside, Duftstoffe

Artikelnummern:

C800316 Zeta 50+ Absauganlagendesinfektion, neutral



Gefahr

