

## **Zeta Finish Prothesenreiniger**

### **Anwendungshinweise**

- Zum Reinigen und Entfernen von Monomerresten
- Dermatologisch getestet
- FCKW frei
- Erhöhte Haftung
- Verleiht Hochglanz

### **Art der Anwendung**

Zeta Finish verleiht der Arbeit Hochglanz und einen frischen Geschmack sowie ein sofortiges, angenehmes Tragegefühl. Es entfernt Monomerreste aus der Oberfläche von Kunststoffen und erhöht die Haftung bei vollprothetischen Arbeiten durch verstärkten Speichelfluss.

### **Anwendung**

Prothetische Arbeiten aus ca. 4-5 cm besprühen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abreiben. Eventuell den Vorgang wiederholen.

### **Sicherheitshinweise:**

H222 – H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen.



Gefahr