

Zeta 30+ Soft Desinfektionstücher Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid
- ✓ Tuberkulozid (M. terrae)
- ✓ Begrenzt viruzid
- ✓ Begrenzt viruzid Plus

Art der Anwendung

Gemäß MPG:

Gebrauchsfertige Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung:

Gebrauchsfertige Feuchttücher zur Desinfektion von kleineren Flächen.

Hinweise zur Anwendung:

Den wiederverschließbaren Spenderbeutel oben öffnen und ein getränktes Tuch entnehmen. Danach den Beutel sofort wieder dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Die Tücher sind nach dem ersten Öffnen des Beutels maximal für 28 Tage verwendbar. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum muss vor dem ersten Öffnen des Beutels händisch auf der Plakette bzw. dem dafür vorgesehenen Feld dokumentiert werden.

Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien. Geeignet für den medizinischen Gebrauch.

Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum / Einwirkzeiten Tränkflüssigkeit	Min.
Bakterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13697 (hohe Belastung):	Konz.: 1 Min.
Candida albicans nach EN 13624, EN 1650, EN 13697 (hohe Belastung):	Konz.: 1 Min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung):	Konz.: 1 Min.
„Begrenzt Viruzid“ (behüllte Viren z.B. HBV, HIV, HCV gemäß EN 14476 (hohe Belastung):	Konz.: 1 Min.
„Begrenzt viruzid Plus“ (behüllte Viren z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren nach EN 14476 (niedrige Belastung):	Konz.: 1 Min.
Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung):	Konz.: 1 Min

Sicherheitshinweise:

H 228 Entzündbarer Feststoff. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 070699 entsorgen.

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

VO 648/2004/EG:

Enthält Duftstoffe

Artikelnummern:

C800750 Zeta 30+ Soft Desinfektionstücher

BAUA-Nr. N-80655

UFI-Nr.: WW0U-0X2W-W109-C3GY



CE0124

Gefahr

