

Acrycem

Gebrauchsanweisung

Eugenolfreier, provisorischer Zement für Kronen und Brücken in Minimix-Spritzen.

Acrycem ist ein **automatisch anmischbarer, eugenolfreier, provisorischer Zement** sowohl für provisorische Kronen und Brücken als auch für Probestbefestigungen von permanenten Restaurationen. Die Haftung an dem provisorischen Kronen- und Brückenmaterial ist hervorragend, während es hingegen sehr leicht von den Zahnstümpfen entfernt werden kann. Geliefert in der MINIMIX-Spritze kann Acrycem sehr einfach und komfortabel angewendet werden. Aufgrund seiner nicht eugenolhaltigen Formulierung beeinflusst Acrycem in keiner Weise die spätere Aushärtung der für die permanenten Kronen und Brücken bzw. Füllungen verwendeten Composit-Zemente bzw. Composite. Der provisorische Kronen- und Brücken-Zement ist auf der Grundlage von ZnO und organischen Säuren hergestellt. Insbesondere in Fällen von Allergien, verursacht durch Eugenol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.

Acrycem erfüllt die Anforderungen der **DIN EN ISO 3107** bzw. der **ADA/ANSI Specification No.30**.

ANWENDUNG

Vorbereiten der MINIMIX-Spritze:

Der Verschluß der MINIMIX-Spritze wird entfernt (wegwerfen, nicht wieder verwenden!) und durch eine spezielle 1:1-Mischkanüle ersetzt. Durch seitliches Verdrehen um 90° wird die Mischkanüle fixiert. Das Material kann direkt aus der Mischkanüle appliziert werden.

Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Anwendung als Verschluss. Die ersten 2-3 mm des aus der Mischkanüle austretenden Materials sollte verworfen werden. Dies gilt für jede neue Anmischung.

Applikation:

Das Applizieren in die provisorische Krone oder Brücke erfolgt unter leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle. Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge gemischten Materials, wird in die Innenseite der provisorisch zu befestigenden Krone oder Brücke gegeben und diese nach spätestens **1:30 Minuten** (Verarbeitungszeit bei 23°C) vorsichtig, mit leichtem, dann mit festem Druck auf den präparierten Stumpf gesetzt.

Hinweis:

Den Stumpfbereich nicht vorher trocknen, sondern eher mit etwas Wasser befeuchten. Ein feuchtes Milieu (feuchter Stumpf) erleichtert es, später die temporäre Krone oder Brücke zu entfernen.

Acrycem wird nach ca. **2 bis 3 Minuten** im Mund plastisch hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss entfernt werden.

Warnhinweise:

- Acrycem nicht anwenden bei Patienten, die eine Allergie zu diesem Material haben.
- Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser waschen.
- Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.

Lagerhinweis:

Bei 8 - 25°C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Garantie:

Die Zhermack GmbH Deutschland garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Zhermack übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bzgl. Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Zhermack in der Reparatur oder dem Ersatz des Zhermack Produktes.

Haftungsbeschränkung:

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für die Zhermack GmbH Deutschland keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig, ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für zahnärztliche Gebrauch!**

