

# Acrybite (AUTOMIX)

Bissregistriermaterial

Acrybite ist ein **sehr hartes Bissregistriermaterial** auf Basis multifunktionaler Methacrylate für eine schnelle und genaue Bissregistrierung. Durch die Applikation aus **selbstmischenden AUTOMIX-Kartuschen** kann es direkt und blasenfrei auf den Zahn appliziert werden.

Durch den kaum spürbaren Widerstand beim Kieferschluss garantiert Acrybite eine zuverlässige Bissregistrierung der Okklusion. Es kann aufgrund seiner hohen Endhärte sehr leicht gefräst werden und ist nicht brüchig.

## Vorbereiten der Kartusche

Der Verschluss der Kartusche wird entfernt (**wegwerfen, nicht wiederverwenden!**) und durch die beigelegte Mischkanüle ersetzt. Das zugehörige Austragegerät wird sodann mit der Acrybite -Kartusche bestückt und ist sofort applikationsbereit.

### Anmerkung:

Das zuerst aus der Mischkanüle austretende Material (etwa die Menge einer Erbse) sollte verworfen werden. Danach ist die Mischung perfekt. Dies gilt für jede neue Anmischung.

Die gebrauchte Mischkanüle dient nach Verwendung als Verschluss der Kartusche.

## Registrierung

### Wichtiger Hinweis:

**Acrybite eignet sich für die Abformung von 3–4 Zähnen. Für die Abformung ganzer Zahnreihen Acrybite segmentweise verwenden.**

**Eventuell vorhandene Kunststoffaufbauten mit einem geeigneten Trennmittel (z.B. Vaseline) isolieren, Brückenzwischenglieder ausblocken (z.B. mit Wachs).**

Acrybite direkt auf die zu registrierenden trockenen Occlusalflächen applizieren (max. Stranglänge 3-4 cm). Nach **30 Sekunden** (Verarbeitungs- bzw. Applikationszeit bei 23°C) soll der Biss geschlossen werden.

Anmerkung: Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

Nach ca. **30-45 Sekunden** im Mund soll der Patient den Biss leicht öffnen und wieder schließen. Dies erleichtert die spätere Entnahme des Bissregistrats. Nach **ca. 1:30 Minuten** ab Mischbeginn ist das Material ausgehärtet und das Registrat kann entnommen werden.

Zur Vermeidung von Positionsfehlern das Registrat mit geeigneten Kunststoff-Fräsen auf die okklusalen Kontaktflächen reduzieren.

### Wichtig:

Kontakt mit Retraktionslösungen vermeiden. Rückstände von Retraktionslösungen können zu einer Verlängerung der Abbindezeit führen. Daher vor der Bissregistrierung gründlich mit Wasser spülen.

## Desinfektion

Vor der Desinfektion mit Standard-Desinfektionslösungen die Sauerstoffinhibitionsschicht mit Alkohol entfernen. Bei Verwendung alkoholhaltiger Produkte kann die Sauerstoffinhibitionsschicht beim Desinfizieren mit entfernt werden.

## Artikulator

Acrybite erlaubt eine exakte Kontrolle bei der Fixierung des Gipsmodells im Artikulator. Registrare aus Acrybite sind über Monate lagerfähig, ohne zu schrumpfen.

## Warnhinweise

Acrybite ist methylnmethacrylatfrei, enthält jedoch andere Acrylate.

Bei empfindlichen Patienten lässt sich eine Sensibilisierung durch Acrybite nicht ausschließen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist der Gebrauch von Acrybite einzustellen. Nicht bei Patienten anwenden, die allergische Reaktionen auf Acrylate zeigen.

Kontakt mit Haut, Schleimhaut und Augen vermeiden.

Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

## Lagerung

Nicht über 25 °C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

## Garantie

DS Dental Supply GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. DS Dental Supply GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von DS Dental Supply GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des DS Dental Supply GmbH-Produktes.

## Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für DS Dental Supply GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!**