

Zeta Basic-Desinfektionstücher

Trockene Tücher zum Selbsttränken

Wichtige Hinweise

Eigenschaften:

- ✓ Weiches Vlies
- ✓ 270 x 270 mm
- ✓ 150 Stk.

Anwendung:

Die Tücher aus der Packung nehmen und in den dicht schließenden Spendereimer legen
Anschließend ca. 1,5-1,8 Liter der gewünschten Tränkflüssigkeit (wir empfehlen die Sprüh- und Wischdesinfektion der Zhermack Zeta-Serie) in den Eimer geben. Das Tuch in der Mitte des Vliesröllchens anziehen und von unten durch den Deckelverschluss ziehen.
Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Bitte beachten Sie die Einwirkzeiten, sowie die Anwendungshinweise der gewünschten Tränkflüssigkeit. Die feuchten Tücher sollten nicht länger als 28 Tage verwendet werden. Beim Befüllen ist zu empfehlen, die Bezeichnung, Konzentration und Charge der verwendeten Tränkflüssigkeit, sowie das Befülldatum auf einem separaten Etikett einzutragen. Nur geeignete, dicht schließende Eimer-Spendesysteme verwenden.

Vor jeder Wiederbefüllung ist der Spendereimer inkl. Deckel zu reinigen und mit geeigneten Präparaten zu desinfizieren. Eine Desinfektion der Spendersysteme kann durch manuelle Applikation eines alkoholischen Sprüh- und Wischdesinfektionsmittels durchgeführt werden. Nach dem vollständigen Abtrocknen des Spenders kann dieser anschließend wieder mit Tüchern befüllt werden.

