

**Zeta-Okklu  
Okklusionsspray**

**Anwendungshinweise**

**Art der Anwendung**

Mikropulverisiertes Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Das Pulverspray auf verschiedenfarbiger Pulverbasis wird auf die auf Okklusionspunkte zu untersuchende Stelle aufgesprüht, wobei die besprühte Stelle mit einer feinen Pigmentschicht überzogen wird. Der Farbpigmentfilm ist mit Wasser rückstandsfrei und leicht zu entfernen.

**Anwendung**

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus einer Entfernung von ca. 2 – 5 cm die betreffende Oberfläche dünn einsprühen.

**Sicherheitshinweise:**

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fern halten. Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Gefahr